

### **Összetétel:**

Fehér por alakú egyfázisú tisztító és felületi fertőtlenítőszer. Az AP 100 a következőket tartalmazza: 78 g Mgmonoperoxifitalát-hexahidrát, 15–30% anionos tenzidek. A 0,5%-os munkaoldat pH-értéke ca. 6.

### **Teljesítmény:**

Tisztít és fertőtlenít egy munkafolyamatban. Oldja a tartós, makacs szennyeződések. Magas emulgalóképességgel bír. Kitünő toxikológiai és ökológiai tulajdonságokkal rendelkezik. Meleg víz használata sem okoz szagterhelést a környezetre. Aldehyd- fenolmentes, nem tartalmaz klórtartalmú fertőtlenítőszerhatóanyagot, oldószereket és foszfátokat. AD 87 bevonatolt padozat tisztítására is alkalmas.

### **Hospitalismusprophylaxe esetén a behatási idő:**

0,25% / max. 4 óra

0,50% / max. 1 óra

0,75% / max. 15 Min.

Gutachten Prof. Dr. Schubert, Frankfurt 12/85;

Prof. Dr. Möse, Graz 11/85;

Prof. Dr. Knoll, Marburg 10/85.

HBV (Hepatitis B) és HIV (AIDS):

0,5% / max. 30 Min.

1,0% / max. 15 Min.

Gutachten Prof. Dr. Frösner, München 1/86

Virusinaktiváló (Richtlinie BGA/DVV):

0,75 %/max. 1 óra

Gutachten Prof. Dr. Frösner, München 7/86

### **Felhasználási terület:**

A kórházak, klinikák, szanatóriumok, idősek otthonai, orvosi rendelők, és mentőautók minden vízálló felületén

### **Felhasználás:**

8 l vízhez AP IOO egy zacskót adagoljunk.(1 zacskó. = 20g; 0,25%-os oldat.) Minden lemosható felületen alkalmazható. A felületet le-, ill. felmossuk, tiszta vízzel ne öblítsük le.

### **Veszélyjelzés:**

Irritatív. Irritálja a szemet és a bőrt. Gyermekek kezébe nem kerülhet. A port ne lélegezzük be. Szembe jutáskor azonnal bő vízzel öblítsük a szemet, majd forduljunk orvoshoz. Bőrre jutáskor bő vízzel öblítsük le. A UVV § 7 fertőtlenítőszerre vonatkozó törvény előírásai szerint védőkesztyű viselete kötelező.

Ipari felhasználásra alkalmas.